

Ton rendez-vous

Date: _____

Heure: _____

Préparation au rendez-vous CGM

Félicitations! Tu as choisi le système Eversense® pour la mesure du glucose en continu (CGM).

Avant de ton rendez-vous

- Télécharge l'application Eversense CGM soit via Apple App Store® soit via Google Play™ Store sur ton smartphone compatible.
- Démarre l'application et crée un compte Eversense pour une expérience utilisateur idéal.
 - Sur l'écran d'accueil, sélectionne l'option «Je n'ai pas de Smart Transmitter».
 - Choisis l'unité mmol/L dans laquelle mesurera ton Eversense.
 - Note ton identifiant (adresse e-mail) et, le cas échéant, ton mot de passe pour ton compte Eversense:

Identifiant: _____

Mot de passe: _____

Le jour de ton rendez-vous (date d'insertion)

- Pour ton rendez-vous, porte un haut large, sans manches ou à manches courtes.
- Apporte les éléments suivants:
 - Ton smartphone, complètement chargé et avec l'application Eversense CGM installée.
 - Identifiant (adresse e-mail) et mot de passe pour ton compte Eversense
- Pour que le site d'insertion guérisse complètement, tu devrais éviter pendant les cinq premiers jours, de te baigner, de nager et de faire des activités fatigantes.
- Avant d'utiliser le système CGM Eversense, lis entièrement le manuel d'utilisation et suis impérativement les instructions de ton médecin.

LE SEUL SYSTÈME CGM DE LONGUE DURÉE AVEC UN SEUL CAPTEUR QUI DURE PRESQUE 6 MOIS.

- Aucun changement de capteur hebdomadaire ou bihebdomadaire
- Aucune perte accidentelle du capteur
- Aucun capteur gaspillé lors du retrait et du remplacement du transmetteur
- Aucun achats fréquents de consommables
- Aucun adhésifs qui doivent tenir 14 jours



Application Eversense CGM

Télécharge-la maintenant gratuitement, afin de préparer ton rendez-vous



NOUS SOMMES LÀ POUR TOI.

Téléphone
061 544 79 90
(Lu-Ve, de 9h à 12h / de 13h à 17h)

E-mail
eversense.ch@ascensia.com

Le système de Mesure du Glucose en Continu (CGM) Eversense® E3 est destiné à mesurer de manière continue jusqu'à 180 jours, les taux de glucose chez les individus de 18 ans et plus ayant du diabète. Le système est conçu pour remplacer les mesures de valeur de glycémie par prélèvement au doigt lors de la prise de décisions thérapeutiques. Pour l'étalonnage, les prélèvements capillaires restent nécessaires, surtout une fois par jour après le 21^e jour ou lorsque les symptômes ne correspondent pas aux informations du CGM, ou en cas de prise de médicaments de la classe des tétracyclines. L'insertion et l'enlèvement du capteur sont effectués par un médecin. Le système CGM Eversense E3 peut être prescrit par un médecin. Les patients qui souhaitent en savoir plus doivent consulter leur médecin.

Pour connaître les consignes de sécurité importantes, consulte la page <https://www.ascensia-diabetes.com/eversense/safety-info/>

Eversense, Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring et le logo Eversense sont des marques commerciales de Senseonics Incorporated. Ascensia et le logo Ascensia Diabetes Care sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée.



Distribué par:
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
www.ascensia-diabetes.ch

Fabriqué par: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway · Germantown, MD 20876-7005 USA

ENFIN LIBÉRÉ AVEC LE SEUL CAPTEUR D'UNE DURÉE DE VIE DE PRESQUE 6 MOIS

Pas à pas



1. Ordonnance du médecin et demande de remboursement à la caisse d'assurance maladie

Ton médecin établit l'ordonnance pour le système CGM Eversense.

Pour ce faire, le formulaire "Demande de prise en charge des frais auprès de la caisse d'assurance maladie" peut être utilisé. Pour obtenir plus d'informations, contacte ton médecin.

2. Attendre la validation par la caisse d'assurance

Le médecin se charge de la coordination initiale des procédures avec ta caisse maladie. Ta caisse maladie t'envoie ou à ton médecin la confirmation de prise en charge des coûts.

Que faire en cas de refus de la caisse de maladie?

Nous sommes en négociation permanente avec les caisses d'assurance maladie, afin d'améliorer la situation pour toi. Tu peux compter sur notre aide. Contacte notre **équipe Eversense d'Ascensia Diabetes Care Service**.

3. Prise de rendez-vous dans un centre Eversense

Maintenant, prends ton rendez-vous pour l'implantation auprès d'un centre Eversense. Pour trouver le centre le plus proche de chez toi, consulte:
www.ascensia-diabetes.ch/eversense-clinics
(Ou flashe le QR-Code ci-dessous avec ton smartphone)



Mon centre Eversense:

4. Tu reçois ton transmetteur

Une fois que tu as fixé la date d'implantation avec ton centre Eversense, le centre commandera le système CGM Eversense à cette date.

Par la suite, Ascensia Diabetes Care t'enverra le transmetteur Eversense à ton domicile. Merci de l'apporter à ton rendez-vous d'implantation. Assure-toi que le transmetteur soit complètement chargé.

Télécharge l'application Eversense CGM soit via l'App Store® soit via Google Play™ Store sur ton smartphone.

Pour plus d'informations sur la compatibilité, consulte:
www.global.eversenseddiabetes.com/compatibility

5. Instructions techniques et implantation du capteur


Tu recevras une formation technique dans ton centre Eversense. Ensuite, ton premier capteur sera implanté.

Tu trouveras une check-list pour le jour de l'implantation au verso de ce dépliant.

6. Profite de la nouvelle liberté acquise!

Si tu as besoin d'aide avec ton nouveau Eversense, il te suffit de contacter **l'équipe Eversense d'Ascensia Diabetes Care Service** et nous te soutiendrons volontiers!

Ascensia Diabetes Care Service
Téléphone: 061 544 79 90
(Lu - Ve, de 9h à 12h / de 13h à 17h)
E-mail: eversense.ch@ascensia.com

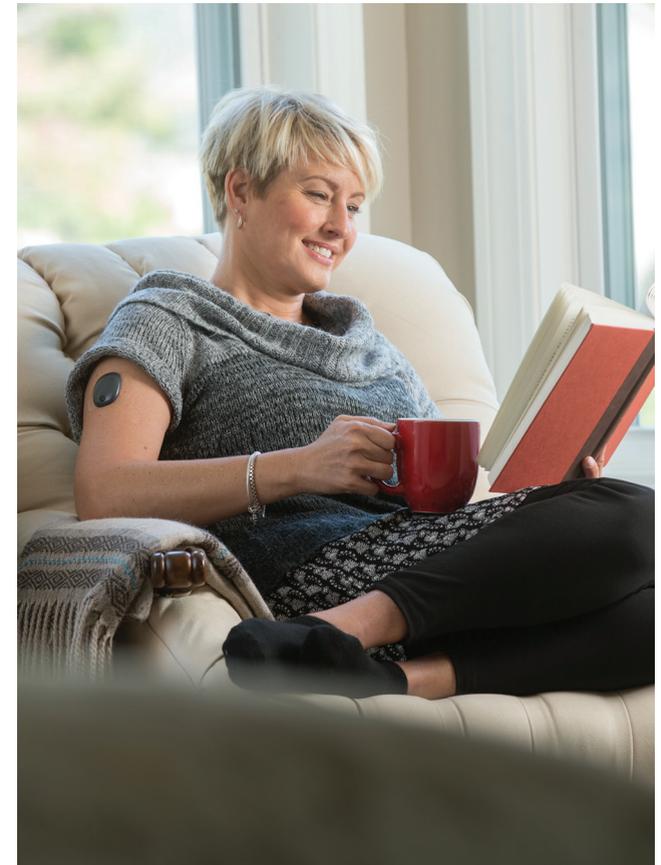

7. Facturation et remboursement

Le centre Eversense facturera les frais du capteur et de l'intervention directement à la caisse maladie.

Transmetteur/adhésif: Le transmetteur Eversense te sera facturé directement (commande E-Shop).

Nous te prions de bien vouloir régler directement cette facture et ensuite de l'envoyer à ta caisse maladie pour le remboursement.