

Contour XT


Sistema per il monitoraggio della glicemia



Guida Rapida



Lo strumento CONTOUR®XT

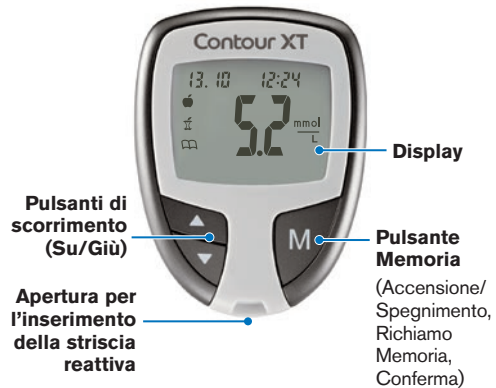

Da utilizzare solo con le strisce reattive CONTOUR®NEXT




Istruzioni di base per l'esecuzione del test

Per le istruzioni complete, consultare il Manuale d'uso di CONTOUR®XT e l'insero del dispositivo pungidito.
ATTENZIONE: il dispositivo pungidito fornito con il kit è studiato per essere utilizzato da un solo paziente.

Preparazione al test

1. Lavare e asciugare bene le mani prima di eseguire il test.
2. Inserire l'estremità grigia della striscia reattiva nell'apposita apertura dello strumento.
3. Lo strumento si accende e sul display verrà visualizzata una striscia reattiva con una goccia di sangue lampeggiante per informare che lo strumento è pronto per eseguire il test.
4. Rimuovere il coprilancetta dal dispositivo pungidito.
5. Allentare il cappuccio protettivo rotondo della lancetta ruotandolo di 1/4 di giro, ma senza rimuoverlo.

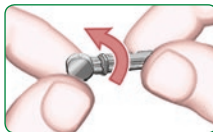

6. Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo pungidito fino in fondo.



7. Svitare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta.



8. Riposizionare il coprilancetta.



9. Regolare il selettore del coprilancetta per scegliere la profondità di puntura.




Prelievo della goccia di sangue

1. Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la zona da pungere e premere il pulsante di rilascio.
2. Per favorire la formazione della goccia di sangue, massaggiare la mano e il dito verso la zona della puntura.




Esecuzione del test

1. Utilizzare solo strisce reattive CONTOUR NEXT con lo strumento CONTOUR XT.
2. Accostare la punta della striscia reattiva alla goccia di sangue. Il sangue viene aspirato nella striscia reattiva attraverso l'area di campionamento.
3. Mantenere la striscia reattiva a contatto con la goccia di sangue finché lo strumento non emette un segnale acustico.

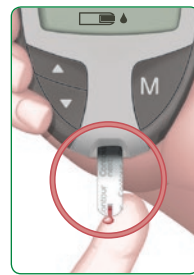

Test dal polpastrello

4. Il risultato viene visualizzato dopo un conto alla rovescia di 5 secondi.
5. Per spegnere lo strumento, rimuovere la striscia reattiva usata per evitare lesioni o contaminazioni di altre persone.

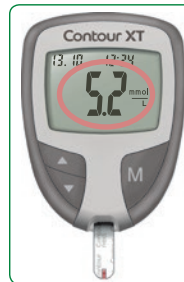

Per rimuovere la lancetta dal dispositivo pungidito consultare le istruzioni complete riportate nell'insero del dispositivo pungidito.

Le immagini del dispositivo pungidito hanno soltanto finalità illustrative.

Per uso diagnostico in vitro.

**È necessaria assistenza?
Contattare il Servizio Clienti
Tel.: 061 544 79 90
www.ascensia-diabetes.ch**



Potenziale rischio biologico

Tutti i sistemi per la misurazione della glicemia sono considerati a rischio biologico.

Gli operatori sanitari o le persone che utilizzano questo sistema su più pazienti devono attenersi alla procedura di controllo delle infezioni approvata dalla struttura sanitaria di appartenenza. Tutti i prodotti che entrano in contatto con il sangue umano devono essere trattati, anche dopo essere stati puliti, come materiali potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive.

L'utilizzatore deve seguire le raccomandazioni per la prevenzione di malattie trasmissibili con il sangue in ambito sanitario come raccomandato per campioni umani potenzialmente infetti.

Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts e il logo No Coding (Codifica Automatica) sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Utilizzo della Modalità avanzata

Impostazione dello strumento in Modalità avanzata

Per impostare lo strumento in Modalità avanzata e utilizzare i marcatori pre e post prandiali e altre funzionalità disponibili:

1. Premere **M** per accendere lo strumento.
2. Premere e mantenere premuto per 3 secondi il tasto **▲** oppure **▼**.
3. L'indicazione L-1 lampeggerà.
4. Premere il tasto **▲** oppure **▼** per visualizzare L-2.
5. Premere il tasto **M** per confermare l'impostazione.



Per scoprire come queste funzionalità aggiuntive possono aiutare a gestire il diabete, contattare il Servizio Clienti
Tel.: 061 544 79 90

www.ascensia-diabetes.ch
www.patents.ascensia.com

Dopo aver eseguito un test e aver visualizzato il risultato, utilizzare i marcatori presenti sul display:

PER CONTRASSEGNARE I RISULTATI	COSA APPARE	PER IMPOSTARE	COSA APPARE	COSA SIGNIFICA	UTILIZZO DEL PROMEMORIA
<p>Pre prandiale</p> <p>Contrassegna il risultato di un test eseguito prima di un pasto.</p> <p>Premere il tasto ▲ oppure ▼</p>		Premere il tasto M		Il risultato viene contrassegnato come test pre prandiale. Premere nuovamente il tasto M per impostare un promemoria per eseguire un test post prandiale.	<p>Quando viene emesso il segnale acustico del promemoria, lo strumento si accende e verrà visualizzato il risultato del test pre prandiale.</p> <p>Premere una volta un tasto qualsiasi per disattivare il segnale acustico del promemoria o due volte per spegnere lo strumento. Eseguire un altro test del sangue e contrassegnarlo con il marcatore post prandiale (si veda la tabella a sinistra).</p>
<p>Post prandiale</p> <p>Contrassegna il risultato di un test eseguito dopo un pasto.</p> <p>Premere il tasto ▲ oppure ▼</p>		Premere il tasto M		Il risultato viene contrassegnato come test post prandiale.	
<p>Diario</p> <p>Contrassegna qualunque risultato come unico o differente in qualche modo.</p> <p>Premere il tasto ▲ oppure ▼</p>		Premere il tasto M		Il risultato viene contrassegnato in memoria come unico. Questo è un risultato che andrebbe annotato nel diario.	
	Consente di impostare un promemoria (impostazione predefinita su 2 ore) per eseguire un test post prandiale. Per le istruzioni complete sull'utilizzo dei marcatori e sull'impostazione dell'ora per i promemoria, consultare il Manuale d'uso.				

Codici e simboli di errore

Per un elenco completo dei codici di errore, consultare il Manuale d'uso.

E1	Temperatura fuori intervallo.
E2	La striscia reattiva non ha aspirato una quantità di sangue sufficiente per eseguire un'analisi accurata. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.
E3	Lo strumento rileva una striscia reattiva usata oppure è stata usata una soluzione di controllo errata. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.
E11	Risultato anomalo. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.

ASCENSIA
Diabetes Care

Distributore per la Svizzera:
Ascensia Diabetes Care
Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
CH-4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90
E-mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch
www.diabetes.ascensia.com



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

85659332
Rev. 01/17