

Contour next link

Sistema per il monitoraggio della glicemia con trasmissione dati senza fili



Da utilizzare solo con le strisce reattive CONTOUR®NEXT

CODIFICA AUTOMATICA



ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

GUIDA RAPIDA

VISTA DALL'ALTO



VISTA

ANTERIORE

Spia dell'apertura per la striscia reattiva

Tasto Menu

Schermo

Connettore USB

Apertura per l'inserimento della striscia reattiva

Tasti di selezione/scorrimento

Cappuccio protettivo USB

Nota: controllare le unità di misura dello strumento. Per informazioni complete consultare il manuale d'uso dello strumento.

865620088 Rev. 01/17

Impostazione iniziale dello strumento e collegamento al dispositivo compatibile Medtronic

Ricaricare lo strumento

1 Rimuovere il cappuccio USB per scoprire il connettore USB.

Lo strumento CONTOUR®NEXT LINK ha una batteria ricaricabile permanente.

Ricaricare lo strumento con il caricabatterie da parete* o collegando il connettore USB a un computer. Assicurarsi che il computer sia acceso.

Lo strumento visualizza brevemente l'indicazione "Non eseguire il test - In carica" e la spia dell'apertura per l'inserimento della striscia reattiva lampeggia. **Non è possibile eseguire un test della glicemia durante la ricarica della batteria.**

Al termine della ricarica, la spia dell'apertura per l'inserimento della striscia reattiva si spegnerà. Scollegare lo strumento CONTOUR NEXT LINK per eseguire il test.




Scollegare lo strumento in carica, prima di iniziare l'impostazione

2 Per iniziare l'impostazione, tenere premuto il tasto Menu per qualche secondo, fino a quando lo strumento si accenderà.



3 Scorrere verso il basso per selezionare la lingua desiderata e premere OK.

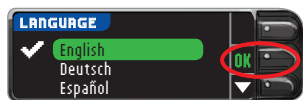

Questo esempio di schermata mostra la selezione della lingua. L'ordine delle lingue può essere diverso a seconda del Paese.

Premere **OK** se la lingua visualizzata è quella desiderata. Premere **NO** se la lingua visualizzata non è quella desiderata.

4 Premere **OK** per iniziare la procedura di collegamento.


NOTA: il termine microinfusore si riferisce al dispositivo compatibile Medtronic.



5 **STOP. NON premere ALCUN tasto.**

Questa schermata mostra l'ID glucometro (nell'angolo in basso a sinistra). Questo ID è necessario per completare la procedura di collegamento.

Riporre lo strumento. Prendere il dispositivo compatibile Medtronic, e per continuare passare al punto 6.

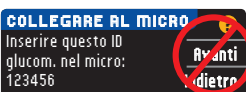

Collegare lo strumento al microinfusore MiniMed Paradigm™

6 Premere **ACT** per accedere al **MENU PRINCIPALE**. Scorrere le voci fino a **Utilità** premendo il tasto freccia giù. Premere **ACT**.



7 Scorrere le voci fino a **Collegare dispositivi** e premere **ACT**. Quindi scorrere le voci fino a **Glucometri** e premere **ACT**.


NOTA: se il **MENU UTILITÀ** non contiene **Collegare dispositivi**, scorrere le voci fino a **Opzioni glucometro** e premere **ACT**.




8 Selezionare **On** e premere **ACT**. Se si sta sostituendo uno strumento, passare al punto 9. Se si sta aggiungendo un nuovo strumento, passare al punto 11.



9 Per sostituire uno strumento, selezionare **Annullare ID** e premere **ACT**.

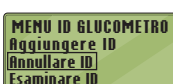

10 In caso di più ID glucometro, ripetere il punto 9 per ognuno di essi.

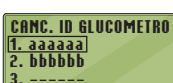



? = Guida

*Il caricabatterie non è incluso nel kit dello strumento; è possibile richiedere il caricabatterie da parete contattando il Servizio Clienti. I recapiti del Servizio Clienti sono riportati nella pagina a fianco.

11 Per aggiungere un nuovo strumento, selezionare **Aggiungere ID** e premere **ACT**. Fare riferimento al punto 5 (o vedere il retro dello strumento) per trovare l'ID (SN) glucometro.

Utilizzare i tasti freccia su e giù per inserire l'ID glucometro composto da sei caratteri, e visualizzato sullo schermo dello strumento.

Premere **ACT** dopo l'inserimento di ogni carattere.

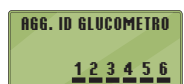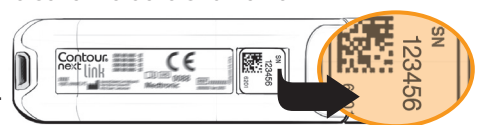

12 Selezionare **Esaminare ID** sul dispositivo compatibile Medtronic per confermare che l'ID glucometro di CONTOUR®NEXT LINK sia stato inserito correttamente. Se l'ID non è corretto, tornare al punto 9.

NOTA: per istruzioni dettagliate, consultare la guida per l'utente del dispositivo compatibile Medtronic.



13 Tornare allo strumento CONTOUR NEXT LINK. Dopo aver inserito l'ID glucometro nel dispositivo compatibile Medtronic, premere **Avanti**.



Selezionare le opzioni di invio dello strumento


14 **OPZIONI DI INVIO** controlla la modalità utilizzata dallo strumento per inviare i risultati della glicemia al dispositivo compatibile Medtronic.

Selezionare l'**OPZIONE DI INVIO** desiderata.

Sempre = lo strumento invierà sempre i risultati.

Conferma = lo strumento chiederà conferma per inviare i risultati.

Mai = lo strumento non invierà mai i risultati.

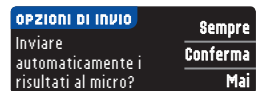

Impostare la data e l'ora dello strumento in modo che coincidano con quelle del dispositivo Medtronic

15 La data e l'ora dello strumento devono coincidere con la data e l'ora del **dispositivo Medtronic**. Prendere il **dispositivo Medtronic**.

Premere **ACT** per accedere al **MENU PRINCIPALE**.

Scorrere le voci fino a **Utilità** e premere **ACT**.

Scorrere le voci fino a **Ora/Data** e premere **ACT**. Selezionare un formato per l'ora e premere **ACT**. Annotare l'ora e la data. Riprendere lo **strumento**. Seguire le istruzioni sullo **strumento** per modificare la data e l'ora in modo che coincidano con quelle del **dispositivo Medtronic**.



Impostazioni aggiuntive dello strumento

16 Premere **Accetta** per selezionare **AutoLog disattivato**.

AutoLog consente di contrassegnare il risultato di un test come Diggiuno, Pre pasto, Post pasto o Niente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dello strumento.




17 **Accettare o modificare** gli avvisi di glicemia alta e bassa.

Lo strumento avverte con un segnale acustico quando la glicemia è superiore o inferiore agli avvisi impostati.



18 **Accettare o modificare** l'intervallo predefinito.

Il Target è l'intervallo personale per i risultati glicemici.

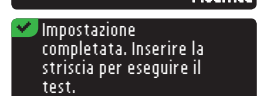

NOTA: gli allarmi possono essere impostati solo al di fuori degli intervalli Target selezionati. Gli intervalli Target possono essere impostati solo all'interno dei livelli di allarme selezionati. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Clienti. I recapiti del Servizio Clienti sono riportati nella pagina successiva.

L'IMPOSTAZIONE È STATA COMPLETATA!

Girare la pagina per vedere le istruzioni sull'esecuzione del test. ➔



Strisce reattive CONTOUR®NEXT



Dispositivo di prelievo



Lancette



Strumento per il monitoraggio della glicemia CONTOUR®NEXT LINK


⚠ AVVERTENZE:

- Il dispositivo di prelievo è destinato all'uso da parte di un singolo paziente. Non deve essere utilizzato su più di una persona in quanto potrebbe comportare il rischio di infezioni.^{1,2}
 - Utilizzare una nuova lancetta ad ogni test, poiché non è più sterile dopo l'uso.
 - Tutti i componenti di questo kit sono considerati a rischio biologico e possono potenzialmente trasmettere malattie infettive, anche dopo essere stati puliti.
 - Lavare sempre le mani con acqua e sapone e asciugarle accuratamente prima e dopo l'esecuzione del test, l'uso dello strumento, del dispositivo di prelievo o delle strisce reattive.
- Per istruzioni complete sulla pulizia dello strumento, consultare il manuale d'uso dello strumento.


Come eseguire un test

Prelevare la goccia di sangue

1 Da qualsiasi schermata ed inserendo la striscia reattiva verrà visualizzata la schermata **ASPIRARE IL SANGUE**.

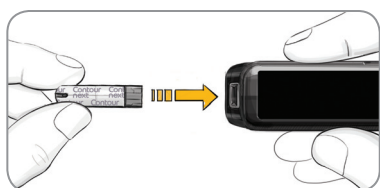


2 Rimuovere il coprilancetta dal dispositivo di prelievo. Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo di prelievo fino in fondo.

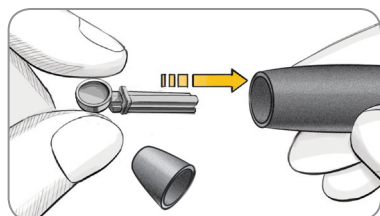


Le immagini del dispositivo di prelievo hanno soltanto finalità illustrative. Il dispositivo di prelievo in dotazione potrebbe essere diverso. Per istruzioni complete su come preparare il dispositivo di prelievo, consultare il relativo foglietto illustrativo.

3 Riposizionare il coprilancetta. Ruotare il selettore del coprilancetta per regolare la profondità della puntura.

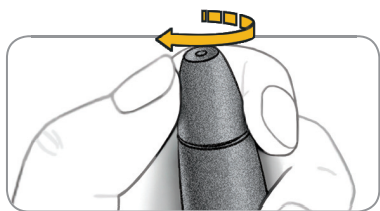


4 Prelevare la goccia di sangue.

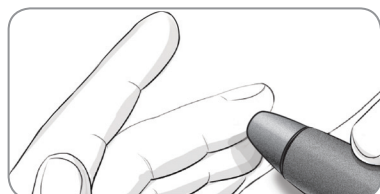

Eseguire il test della glicemia

5 Accostare la punta della striscia reattiva alla goccia di sangue. Se la prima goccia di sangue non dovesse essere sufficiente, lo strumento emetterà due segnali acustici e visualizzerà **CAMPIONE INSUFFICIENTE**. È possibile riapplicare il campione di sangue sulla stessa striscia reattiva entro 30 secondi.

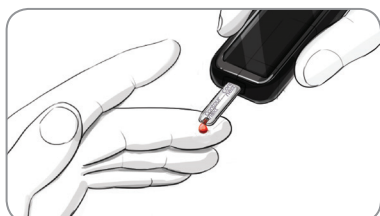

6 Se AUTOLOG è attivato, si potrà scegliere di contrassegnare il risultato come: **Digiuno**, **Pre pasto**, **Post pasto** o **Niente**.



NOTA: se il risultato è superiore o inferiore agli avvisi di glicemia alta o bassa, questo verrà visualizzato senza dover effettuare una selezione nella schermata Autolog.

Bibliografia

- 1 US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Inviare i risultati al dispositivo compatibile Medtronic

7 Se **Sempre** è stato selezionato in **Opzioni invio**, durante l'impostazione, i risultati saranno inviati direttamente al microinfusore. Se **Conferma** è stato selezionato in **Opzioni invio** durante l'impostazione, si può scegliere se inviare il risultato al microinfusore dopo ogni test della glicemia. Premere **Invia** o **No inviare**.



Premere **OK** per passare alla schermata successiva.



ATTENZIONE: controllare sempre lo schermo del microinfusore per assicurarsi che quello visualizzato coincida con il risultato della glicemia visualizzato sullo strumento.

Avvisami e Note

8 Selezionare **Avvisami** per impostare un promemoria per il test successivo. Selezionare **Note** per aggiungere ulteriori informazioni al risultato. Rimuovere la striscia reattiva.



Spegnere lo strumento

9 Rimuovere la striscia reattiva; lo strumento si spegnerà entro 3 minuti. Oppure, tenere premuto il tasto Menu per spegnere lo strumento.



Per istruzioni complete, consultare il manuale d'uso di CONTOUR NEXT LINK, il foglietto illustrativo del dispositivo di prelievo e la guida per l'utente del dispositivo compatibile di Medtronic.

Il Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care è disponibile tramite:

Numero tel.: 061 544 79 90

E-mail: info@ascensia.ch

www.ascensia-diabetes.ch

www.diabetes.ascensia.com

Per informazioni sui brevetti e le relative licenze, visitare il sito: www.patents.ascensia.com

IVD Per uso diagnostico in vitro.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts e il logo No Coding (Codifica Automatica) sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed e Paradigm sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Medtronic MiniMed, Inc.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

