

Hapat për suksesin me gjilpërën

1 Përgatit



Kthejeni dhe hapeni kapakun siç tregohet
Rreshtoni shenjën e bardhë të ngritur dhe shenjën e zezë të shtypur



Lironi kapakun mbrojtës të rrumbullakët mbi gjilpërën, por mos e hiqni atë

Rrotullojeni me 1/4



Futni gjilpërën në mënyrë të sigurtë në pajisjen e shpimit
Shtyjeni derisa gjilpëra të ndalojë plotësisht



Me kujdes hiqni kapakun e rrumbullakët mbrojtës
Ruajeni kapakun për të hedhur gjilpërën e përdorur



Rivendosni kapakun "Kërciteni" për t'a mbyllur

2 Shpo



Rrotullojeni diskun e kapakut për të rregulluar thellësinë e shpimit
1 për më të cektnë dhe 5 për më të thellën



Tërhiqeni dorezën e rivendosjes derisa të ngrihet butoni i çlirimit



Shtyjeni pajisjen e shpimit fort tek ana e gishtit dhe shtypni butonin e lëshimit
Do të dëgjoni një kërcitje kur gjilpëra lirohet

3 Nxirr



Hiqni kapakun
Vendoseni kapakun mbrojtës që e ruajtët, mbi një sipërfaqe të sheshtë. Shtyjeni gjilpërën brenda kapakut siç tregohet



Shtyjeni nxjerrësin gri të gjilpërave përpara derisa gjilpëra të bjerë brenda në mbajtëse, pastaj rrëshqiteni nxjerrësin pas Mos harroni të rivendosni kapakun



Përpara përdorimit dhe për informacion të plotë, ju lutemi shihni fletëpalosjen e paketimit të MICROLET®NEXT



Microlet
next Lancing Device



Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Tel.: 061 544 79 90
E-Mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

Contour
diabetes solutions

ASCENSIA
Diabetes Care

CONTOUR®XT Aparat matës dhe CONTOUR®NEXT Sensorë

Udhëzim i shkurtër përdorimi

Thjeshtë. Precize.

multi
puls



NO CODING




Contour
next Sensorët

Contour
XT
Aparat matës i sheqerit në gjak

HAPI I 1.: Futja e sensorit

Futeni skajin e përhimët të sensorit në hapjen e sensorit të aparatit për matjen e sheqerit në gjak CONTOUR®XT. Në këtë mënyrë aparati kodohet në mënyrë automatike! Tani aparati ndizet vetvetiu. Në ekran paraqitet sensori me ndezje dhe shuarje në formë të pikës së gjakut. Kjo tregon që aparati është i gatshëm për matjen e sheqerit në gjak.

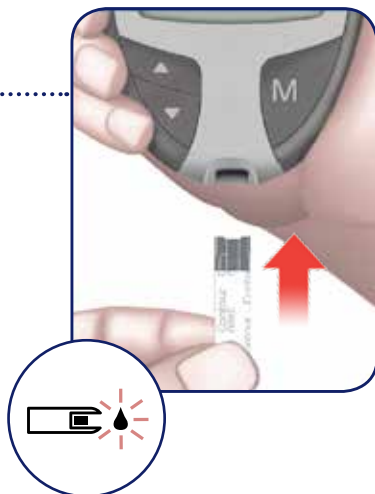

HAPI I 2.: Matja e gjakut + Shfaqja e rezultatit të matjes

Mbajeni hapjen matëse të sensorit menjëherë në pikën e gjakut. Gjaku do të thithet automatikisht në brendi të sensorit. Mbajeni më tutje sensorin në pikë të gjakut deri sa të dëgjohet sinjali. Pas tonit të sinjalit fillon koha matëse për 5 sekonda. Pas kësaj rezultati juaj i matjes do të shfaqet dhe do të memorizohet automatikisht.



HAPI I 3.: Shfaqja e rezultatit të matjes

Me tonin e sinjalit fillon ecja e kohës së matjes prej 5 sekondave. Pas kësaj rezultati juaj i matjes do të shfaqet dhe memorizohet automatikisht.



HAPI I 4.: Hiqja e sensorit

Në momentin kur ju e hiqni sensorin pas matjes me CONTOUR®XT, aparati fiket automatikisht vetvetiu.



CONTOUR®NEXT Sensorët

CONTOUR®NEXT Sensorët ju mund të i gjeni në paketime prej 50 apo 100 copë.

