


# Nicht vergessen: Lanzetten wechseln!



NEUE LANZETTE



EINMAL VERWENDET

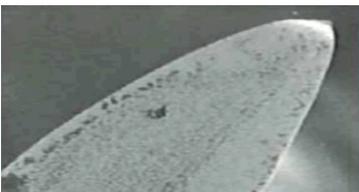

VIERMAL VERWENDET



ZEHNMAL VERWENDET

- Beim Stechen wird die Lanzette stumpf und verursacht beim nächsten Stechen Schmerzen!
- Die Einstichwunde heilt schlechter ab, wenn Lanzetten mehrfach benutzt werden!
- Wiederverwendete Lanzetten reißen Löcher in die Haut und schädigen das Gewebe und die Nervenenden!
- Nach der ersten Benutzung ist die Lanzette nicht mehr steril und kann bei der nächsten Blutentnahme Entzündungen und Infektionen hervorrufen!



**Bei jeder Blutgewinnung sollte eine neue Lanzette verwendet werden!  
Die bunten MICROLET® Lanzetten helfen, daran zu denken.**

## Kurz-Anleitung zu Ihrer MICROLET®NEXT-Stechhilfe:



Ascensia Diabetes Care Switzerland AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel  
Hotline: 044 465 83 55  
Fax: 044 465 82 82  
E-mail: [info@ascensia.ch](mailto:info@ascensia.ch)  
[www.ascensia-diabetes.ch](http://www.ascensia-diabetes.ch)

