



Système d'autosurveillance
glycémique

Utilisation avec l'application
CONTOUR®DIABETES disponible en
téléchargement sur
l'App Store™ ou sur Google Play™.







CODAGE
AUTOMATIQUE®



Second-Chance®
Sampling

Utilisation uniquement avec les
bandelettes réactives CONTOUR®NEXT.

MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

Contour[®] next **ONE** ¹⁾

Sistema per il monitoraggio
della glicemia

Funziona con l'app CONTOUR[®]DIABETES
disponibile per il download nell'App
StoreSM o su Google PlayTM.








Utilizza solo le strisce reattive
CONTOUR[®]NEXT.

GUIDA RAPIDA

Diagram illustrating the components of the CONTOUR®NEXT ONE glucometer:

- Indicateur Lumineux (smartLIGHT)**: The display screen.
- Touche Haut ▲**: Up arrow button.
- Touche OK**: Central button.
- Touche Bas ▼**: Down arrow button.
- Port d'insertion de la bandelette réactive**: The test strip insertion port.
- Extrémité carrée grise**: The grey square tip of the test strip.
- Extrémité contenant l'échantillon :** The sample-containing tip of the test strip.
- L'échantillon sanguin est aspiré ici**: The blood sample is aspirated here.

Strumento CONTOUR®NEXT ONE

Diagram illustrating the components of the Contour®NEXT ONE device:

- Luce Target (smartLIGHT)**: Target light (smartLIGHT).
- Tasto Su ▲**: Up button (▲).
- Tasto OK**: OK button.
- Tasto Giù ▼**: Down button (▼).
- Apertura per l'inserimento della striscia reattiva**: Opening for the insertion of the reactive strip.
- Estremità grigia quadrata**: Square gray end. Description: inserire questa estremità nell'apposita apertura per la striscia reattiva (insert this end into the opening for the reactive strip).
- Area di campionamento**: Sampling area. Description: estremità della striscia reattiva in cui viene aspirato il sangue (end of the reactive strip where blood is aspirated).


ATTENZIONE

Lo strumento CONTOUR®NEXT ONE funziona solo con le strisce reattive CONTOUR®NEXT e la soluzione di controllo CONTOUR®NEXT.

L'application CONTOUR®DIABETES

Il est possible de transférer automatiquement (sans câble) les résultats du lecteur de glycémie CONTOUR NEXT ONE sur un smartphone (téléphone) ou une tablette.

1. Depuis un smartphone (téléphone) ou une tablette, accéder à l'App Store™ ou au Google Play™ store.
2. Rechercher l'application CONTOUR DIABETES.
3. Installer l'application CONTOUR DIABETES et suivre les instructions pour connecter le lecteur de glycémie.



OU Scanner avec l'app code QR ou visiter www.contourone.com pour en apprendre plus.

REMARQUE : Si le lecteur de glycémie n'est pas connecté avec l'application CONTOUR DIABETES, il faut suivre les instructions dans le menu *Configuration initiale du lecteur de glycémie* lors de la première utilisation du lecteur de glycémie.

Allumer et éteindre le lecteur de glycémie

- Appuyer et maintenir enfoncée la **touche OK** pendant 2 secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'**allume** ou s'**éteigne**.
- Insérer une bandelette réactive dans le lecteur de glycémie pour **allumer** le lecteur de glycémie.
- Appuyer deux fois sur **OK** quand le lecteur de glycémie est **éteint** pour **allumer** le voyant blanc du port d'insertion de la bandelette réactive.

Touches de défilement Haut/Bas/OK

- Les **touches ▲ et ▼** de l'anneau permettent de faire défiler les options.





Diagram illustrating the control ring (Anneau) and the OK button (Touche OK).

- Appuyer sur la **touche OK** pour confirmer une sélection.



Configuration initiale du lecteur de glycémie

Appuyer et maintenir enfoncée la **touche OK** pendant 2 secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume.







Diagram illustrating the control ring (Anneau) and the OK button (Touche OK).

REMARQUE : Après 30 secondes d'inactivité, l'écran s'assombrit. Pour rallumer l'écran, appuyer sur la **touche OK**.

La configuration initiale démarre avec Afficher la cible prédéfinie.


1 Afficher la cible prédéfinie

Le lecteur de glycémie compare les résultats glycémiques avec un **intervalle cible** (par exemple 3,9 mmol/L–7,2 mmol/L) pour indiquer si le résultat du test est :

- dans  l'**intervalle cible**.
- au-dessus de  l'**intervalle cible**.
- en-dessous de  l'**intervalle cible**.

On peut modifier cet **intervalle cible** prédéfini depuis l'application CONTOUR DIABETES après avoir effectué la configuration initiale du lecteur de glycémie.

Le lecteur de glycémie affiche un **intervalle cible** général

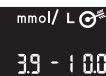


prédéfini.

1. Pour passer à l'écran suivant, appuyer sur la **touche OK**.

Continuer pour *Régler l'heure*.

2 Régler l'heure


Les chiffres des heures **clignotent**.

1. Pour modifier l'heure, appuyer sur la **touche**  **▲** ou **▼** de l'anneau.
2. Pour confirmer l'heure et passer aux minutes, appuyer sur la **touche OK**.
3. Pour modifier les minutes, appuyer sur la **touche** **▲** ou **▼** de l'anneau, puis appuyer sur la **touche OK**.

Pour un format de 12 heures, sélectionner **AM** ou **PM**, appuyer sur la **touche** **▲** ou **▼** de l'anneau, puis appuyer sur la **touche OK**.


3 Régler la date

L'année **clignote**.

1. Pour modifier l'année, appuyer sur la **touche**  **▲** ou **▼**, puis appuyer sur la **touche OK**.
2. Pour modifier le mois, appuyer sur la **touche** **▲** ou **▼**, puis appuyer sur la **touche OK**.
3. Pour modifier le jour, appuyer sur la **touche** **▲** ou **▼**, puis appuyer sur la **touche OK**.


4 La configuration est terminée


Le lecteur affiche brièvement la configuration sauvegardée, puis émet un signal sonore et **s'éteint**.



La configuration est terminée.

Test au bout du doigt

 Consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées sur sa préparation.

 **ATTENTION : Risques biologiques potentiels**

- Toujours se laver les mains avec de l'eau savonneuse et bien les sécher avant et après le test, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.
- Tous les composants de ce conditionnement sont considérés comme présentant un risque biologique et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses.


Se reporter au manuel d'utilisation **CONTOUR NEXT ONE** pour des informations complémentaires.

MISE EN GARDE


- L'autopiqueur fourni est destiné à l'autosurveillance glycémique par un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne afin d'éviter tout risque d'infection.
- Il faut configurer le lecteur de glycémie avant de réaliser un test de glycémie pour la première fois. Se reporter au menu *Configuration initiale du lecteur de glycémie*.

Se reporter au manuel d'utilisation **CONTOUR NEXT ONE** pour des informations complémentaires.

1. Préparer l'autopiqueur.
Consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour des instructions détaillées.
2. Insérer fermement l'extrémité carrée gisive d'une nouvelle bandelette réactive dans le port d'insertion jusqu'à l'émission d'un bip par le lecteur de glycémie.



Le lecteur de glycémie s'allume et affiche l'écran **Appliquer le sang**. Le lecteur de glycémie est maintenant prêt pour la réalisation du test avec une goutte de sang.



3. Utiliser l'autopiqueur pour obtenir une goutte de sang au bout du doigt.

4. Masser la main et le doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.

5. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive au contact de la goutte de sang.

6. Si le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et si l'écran affiche une goutte de sang qui clignote, la bandelette réactive n'a pas absorbé suffisamment de sang. Appliquer de sang sur la bandelette réactive dans les 60 secondes qui suivent.

Tourner la page pour la suite de **Test au bout du doigt** et se renseigner sur les **Marqueurs de repas**.

Besoin d'aide ?

Pour plus d'informations, consulter le site : www.contourone.com ou appeler le Service Clientèle Diabetes Care : 061 544 79 90.

Le lecteur est préconçu et verrouillé pour afficher les résultats en mmol/L. Si les résultats sont exprimés en mg/dL, contacter le Service Clientèle Diabetes Care au 061 544 79 90.



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



ASCENSIA
Diabetes Care

Distribution pour la Suisse :
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
CH-4052 Basel
Tél. : 061 544 79 90
E-mail : info@ascensia.ch
www.contourone.com

Destiné à un usage de diagnostic in vitro.
Pour obtenir des informations sur les brevets et les licences associées, consulter le site : www.patents.ascensia.com

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Glucofast, Microlet, le logo « Codage Automatique » et Second-Chance sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque et les logos du mot **Bluetooth** sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Ascensia Diabetes Care est soumise à une licence.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.

(® = marque déposée. ™ = marque commerciale non déposée.
(SM = marque de service.)


Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire et peuvent être utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou aucune recommandation ne doit être déduite ou suggérée.



2797


4 L'impostazione è completa.


Lo strumento mostra per qualche istante le impostazioni salvate, poi emette un segnale acustico e **si spegne**.

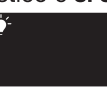

L'impostazione è completa.

Test della glicemia da polpastrello

 Per istruzioni complete su come preparare il dispositivo pungidito, consultare il relativo foglietto illustrativo.

 **ATTENZIONE:**
potenziale rischio biologico

- Lavare sempre accuratamente le mani con acqua e sapone, quindi asciugarle bene prima e dopo l'esecuzione del test, dell'uso dello strumento, del dispositivo pungidito o delle strisce reattive.
- Tutti i componenti di questo kit sono considerati a rischio biologico e possono potenzialmente trasmettere malattie infettive.



Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso di CONTOUR NEXT ONE.

ATTENZIONE


- Il dispositivo pungidito fornito in dotazione è destinato all'uso da parte di un solo paziente. Non deve essere utilizzato su più di una persona in quanto potrebbe comportare il rischio di infezioni.
- Impostare lo strumento prima di eseguire il primo test della glicemia. Fare riferimento a *Impostazione iniziale dello strumento*.

Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso di CONTOUR NEXT ONE.

1. Preparazione del dispositivo pungidito.
Per istruzioni complete, consultare il foglietto illustrativo del dispositivo pungidito.
2. Inserire l'estremità grigia quadrata della striscia reattiva nell'apposita apertura per le strisce reattive fino a quando lo strumento non emetterà un segnale acustico.



Lo strumento si accenderà e mostrerà la schermata **Applicare il sangue**. Ora lo strumento è pronto per eseguire il test con una goccia di sangue.



3. Usare il dispositivo pungidito per prelevare una goccia di sangue dal polpastrello.

4. Per favorire la formazione della goccia di sangue, massaggiare la mano e il dito verso la zona della puntura.

5. Accostare immediatamente la punta della striscia reattiva alla goccia di sangue.

6. Se lo strumento emette due segnali acustici e la schermata mostra una goccia di sangue lampeggiante, significa che il sangue aspirato dalla striscia reattiva non è sufficiente. Applicare altro sangue sulla striscia reattiva entro 60 secondi.

Girare la pagina per continuare con il *Test della glicemia da polpastrello* e per comprendere l'uso dei *Marcatore pasto*.

E' necessaria assistenza?

Per maggiori informazioni, visita il sito www.contourone.com o contatta il Servizio Clienti Diabetes Care al numero 061 544 79 90.

Il tuo strumento è stato preimpostato e bloccato per visualizzare i risultati in mmol/L. Se i risultati sono visualizzati in mg/dL contatta il Servizio Clienti Diabetes Care al numero 061 544 79 90.



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



ASCENSIA
Diabetes Care

Distributore per la Svizzera:
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
CH-4052 Basel
Tel.: 061 544 79 90
E-mail: info@ascensia.ch
www.contourone.com

Per uso diagnostico in vitro.

Per informazioni sui brevetti e le relative licenze, visitare il sito: www.patents.ascensia.com

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, il logo Codifica Automatica, Contour, Glucofast, Microlet e Second-Chance sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Microsoft e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Ascensia Diabetes Care è soggetto a licenza.




Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc. (® = marchio registrato. ® = marchio non registrato. ® = marchio di servizio.)

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi. Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.

Test au bout du doigt, *suite*

MISE EN GARDE

Se reporter à la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour des instructions sur le retrait de la lancette.

Le lecteur de glycémie affiche votre résultat avec les unités, l'heure, la date et l'indicateur de cible : Dans la cible , En-dessous de la cible  ou Au-dessus de la cible .






Le port d'insertion de la bandelette réactive s'éclaire d'une couleur représentant le résultat par rapport à l'intervalle cible.



Test della glicemia da polpastrello, *segue*

ATTENZIONE

Per le istruzioni su come rimuovere la lancetta dal dispositivo pungidito, consultare il foglietto illustrativo del dispositivo pungidito.

Lo strumento visualizza il risultato con le unità di misura, la data, l'ora e l'indicatore del Target: In Target , Sotto il Target  o Sopra il Target .



Il colore dell'apertura per l'inserimento della striscia reattiva rappresenta il valore del risultato rispetto all'intervallo Target.



Résultats LO ou HI

• Si le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et que **LO** (bas) apparaît à l'écran, le résultat glycémique est inférieur à 0,6 mmol/L. **Se référer immédiatement aux conseils d'un professionnel de santé.** Contacter un professionnel de santé.



• Si le lecteur de glycémie émet un signal sonore et que **HI** (haut) s'affiche à l'écran, le résultat glycémique est supérieur à 33,3 mmol/L.

1. Se laver et se sécher soigneusement les mains.
2. Répéter le test avec une nouvelle bandelette.



Si le résultat est de nouveau supérieur à 33,3 mmol/L, **se référer immédiatement aux conseils d'un professionnel de santé.** Retirer la bandelette réactive pour éteindre le lecteur.

Journal

1. Pour allumer le lecteur de glycémie, appuyer et maintenir enfoncée la **touche OK** pendant 2 secondes.

L'écran d'**Accueil** comporte 2 options : **Journal** et **Configuration**.

Le symbole **Journal**  clignote.

2. Pour afficher les données du **Journal**, appuyer sur la **touche OK**.
3. Appuyer sur les **touches ▲** et **▼** de l'anneau pour défiler dans le **Journal**.

Configuration

On peut activer ou désactiver des paramètres comme le **Signal sonore** et l'**Indicateur lumineux (smartLIGHT)** dans le menu **Configuration**.

1. Pour sélectionner le symbole **Configuration**  sur l'écran d'**Accueil**, appuyer sur la **touche ▼** de l'anneau.
2. Quand le symbole **Configuration** clignote, appuyer sur la **touche OK** pour accéder à la **Configuration**.



3. Continuer à appuyer sur la **touche OK** pour faire défiler les paramètres jusqu'à ce que le paramètre à modifier s'affiche. Les options suivantes défilent :

- Réglage de l'heure
- Marqueurs de repas
- Heure
- Intervalles cibles
- Réglage de la date
- Indicateur lumineux (smartLIGHT)
- Date
- Signal sonore
- Bluetooth®

4. Après avoir sélectionné le paramètre à modifier, appuyer sur la **touche ▲** ou **▼** de l'anneau pour activer ou désactiver le paramètre, ou modifier la valeur.



5. Pour accepter la modification, appuyer sur la **touche OK**.

Appuyer sur la **touche OK** pour quitter le menu **Journal** ou le dernier écran du menu **Configuration** et revenir à l'**Accueil**.

Activer les Marqueurs de repas

Si le lecteur de glycémie n'est pas **allumé** :


1. Appuyer et maintenir enfoncée la **touche OK** pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume.



2. Attendre que le symbole **Journal** clignote dans l'écran d'**Accueil**.



3. Appuyer sur la **touche ▼** de l'anneau.

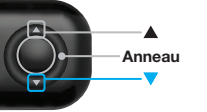

Sélectionner un Marqueur de repas lors d'un test de glycémie

Symboles de Marqueur de repas



REMARQUE : Avant de sélectionner un **Marqueur de repas**, il faut effectuer un test de glycémie. **On ne peut pas sélectionner un Marqueur de repas à partir du menu Configuration**.


1. Tester la glycémie. Voir la rubrique *Test au bout du doigt* dans ce manuel d'utilisation simplifié.
2. Ne pas retirer la bandelette réactive avant d'avoir sélectionné un **Marqueur de repas**.

Le symbole **Marqueur de repas** clignote sur l'écran d'affichage du résultat glycémique :



3. Si le symbole de **Marqueur de repas** qui clignote est celui que l'on désire sélectionner, appuyer sur la **touche OK**.

Pour sélectionner un autre **Marqueur de repas**, appuyer sur la **touche ▲** ou **▼** de l'anneau pour faire défiler les marqueurs.

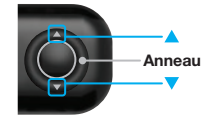


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

4. Quand le symbole du **Marqueur de repas** souhaité clignote, appuyer sur la **touche OK**.

REMARQUE :

- Le lecteur de glycémie passe en mode veille si on ne sélectionne pas un **Marqueur de repas** dans les 30 secondes. Appuyer sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran et procéder à une sélection.
- Le lecteur de glycémie s'éteint si un **Marqueur de repas** n'est pas sélectionné dans les 3 minutes. Le résultat glycémique est enregistré dans le **Journal** sans **Marqueur de repas**.

Écran du lecteur

Symbole	Signification
	Journal
	Configuration
	Réglage de l'Indicateur lumineux (smartLIGHT) (vert=dans la cible ; rouge=en-dessous de la cible ; jaune=au-dessus de la cible)
	Un intervalle cible ou le paramétrage d'un autre intervalle cible, s'affiche à l'écran
	Marqueur À jeun ; peut être utilisé lors des tests réalisés à jeun (aucune consommation d'aliment et de boisson depuis 8 heures, sauf de l'eau ou des boissons non caloriques)
	Marqueur Avant repas ; peut être utilisé lorsque le test est réalisé dans l'heure précédant un repas
	Marqueur Après repas ; peut être utilisé lorsque le test est réalisé dans les 2 heures suivant le début d'un repas

Symbole	Signification
	Aucun Marqueur ; peut être utilisé à tout autre moment qu'avant ou après un repas ou à jeun
	Le résultat glycémique est dans l'intervalle cible
	Le résultat glycémique est au-dessus de l'intervalle cible
	Le résultat glycémique est en-dessous de l'intervalle cible
	Symbole Bluetooth ; indique que l'option Bluetooth est activée ; le lecteur peut être connecté avec un appareil mobile
	Les piles sont déchargées et doivent être remplacées
	Indique une erreur sur le lecteur

Risultati LO o HI

• Se lo strumento emette due segnali acustici e mostra la schermata **LO**, significa che la misurazione della glicemia è inferiore a 0,6 mmol/L. **Seguire immediatamente le indicazioni mediche.** Contattare il proprio medico o diabetologo.



• Se lo strumento emette un segnale acustico e mostra la schermata **HI**, significa che la misurazione della glicemia è superiore a 33,3 mmol/L.

1. Lavare e asciugare bene le mani.
2. Ripetere il test con una nuova striscia reattiva.



Se i risultati sono ancora superiori a 33,3 mmol/L, **rivolgersi immediatamente al proprio medico o diabetologo.**

Per spegnere lo strumento, rimuovere la striscia reattiva.


Diario

1. Per accendere lo strumento, premere e tenere premuto il **tasto OK** per 2 secondi.

Verranno visualizzate varie opzioni, tra cui:

- Formato ora
- Marcatori pasto
- Ora
- Intervalli Target
- Formato data
- Luce Target (smartLIGHT)
- Data
- Bluetooth®
- Audio


2. Per visualizzare le voci del **Diario**, premere il **tasto OK**.

Il simbolo del **Diario**  lampeggia.

3. Premere i **tasti ▲** e **▼** sul bordo esterno circolare per scorrere il **Diario**.

Impostazioni

È possibile attivare o disattivare le Impostazioni come **Audio** e **Luce Target (smartLIGHT)** Accesa o Spenta dalle **Impostazioni**.

1. Per evidenziare il simbolo delle **Impostazioni**  nella **schermata iniziale**, premere il **tasto ▼** sul bordo esterno circolare.
2. Quando il simbolo delle **Impostazioni** inizia a lampeggiare, premere il **tasto OK** per accedere alle **Impostazioni**.



3. Continuare a premere il **tasto OK** per visualizzare le varie impostazioni fino a quando comparirà l'impostazione che si desidera modificare.

- Verranno visualizzate varie opzioni, tra cui:
- Formato ora
 - Marcatori pasto
 - Ora
 - Intervalli Target
 - Formato data
 - Luce Target (smartLIGHT)
 - Data
 - Bluetooth®
 - Audio

4. Una volta individuata l'impostazione da modificare, premere il **tasto ▲** o **▼** sul bordo esterno circolare per attivare o disattivare l'impostazione e modificare il relativo valore.



5. Per accettare una modifica, premere il **tasto OK**.

Per uscire dal **Diario** o dall'ultima schermata delle **Impostazioni**, e tornare alla **schermata iniziale**, premere il **tasto OK**.

Attivazione dei Marcatori pasto

Se lo strumento è **spento**:

1. Premere e tenere premuto il **tasto OK** per 2 secondi per accendere lo strumento.



2. Attendere fino a quando il simbolo del **Diario** non inizia a lampeggiare nella **schermata iniziale**.



3. Premere il **tasto ▼** sul bordo esterno circolare.



4. Quando il simbolo delle **Impostazioni** inizia a lampeggiare, premere il **tasto OK**.



5. Continuare a premere il **tasto OK** per spostarsi tra le varie impostazioni fino a quando comparirà la schermata di impostazione del **Marcatore pasto**.

Non premere ancora il tasto OK.

6. Premere il **tasto ▲** o **▼**. Il simbolo **On** inizierà a lampeggiare.



7. Premere il **tasto OK**.

8. Rivedere ogni intervallo Target e premere il **tasto OK** per passare al prossimo intervallo Target.



La funzione **Marcatore pasto** è attivata.

Selezione di un Marcatore pasto durante un test della glicemia

Simboli dei Marcatori pasto



NOTA: prima di poter selezionare un **Marcatore pasto** è necessario eseguire un test della glicemia. **Non è possibile selezionare un Marcatore pasto nelle Impostazioni**.


1. Eseguire il test della glicemia. Si veda la sezione *Test della glicemia da polpastrello* in questa guida rapida.
2. Non rimuovere la striscia reattiva fino a quando non sarà stato selezionato un **Marcatore pasto**.

Sulla schermata dei risultati del test viene visualizzato il simbolo di un **Marcatore pasto** lampeggiante:



3. Se il **Marcatore pasto** lampeggiante è quello prescelto, premere il **tasto OK**.

Per scegliere un altro **Marcatore pasto**, premere il **tasto ▲** o **▼** sul bordo esterno circolare per scorrere tra i vari marcatori.

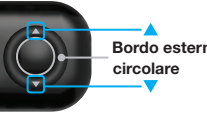

4. Quando il **Marcatore pasto** scelto inizia a lampeggiare, premere il **tasto OK**.

NOTA:

- Se non si seleziona un **Marcatore pasto** entro 30 secondi, lo schermo si attenuerà. Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo schermo ed effettuare una selezione.
- Se non si seleziona un **Marcatore pasto** entro 3 minuti, lo strumento si spegnerà. Il risultato della glicemia viene memorizzato nel **Diario** senza un **Marcatore pasto**.

Schermo dello strumento

Simbolo	Cosa significa
	Diario
	Impostazioni
	Impostazione Luce Target (smartLIGHT) (verde = In Target; rosso = Sotto il Target; giallo = Sopra il Target)
	Indica che viene visualizzato un Intervallo Target o un'Impostazione Target
	Marcatore Digiuno: viene utilizzato se si esegue un test della glicemia dopo un periodo di digiuno (8 ore senza aver assunto cibo o bevande, ad eccezione dell'acqua e delle bevande non caloriche)
	Marcatore Pre Pasto: viene utilizzato se si esegue un test della glicemia entro 1 ora prima di un pasto
	Marcatore Post Pasto: viene utilizzato se si esegue un test della glicemia entro 2 ore dall'inizio di un pasto

Simbolo	Cosa significa
	Nessun Marcatore: viene utilizzato se si esegue un test della glicemia in orari diversi da quelli descritti
	Il risultato del test della glicemia è nell'intervallo Target
	Il risultato del test della glicemia è sopra l'intervallo Target
	Il risultato del test della glicemia è sotto l'intervallo Target
	Simbolo del Bluetooth : indica che l'impostazione Bluetooth è attiva; lo strumento è in grado di comunicare con un dispositivo mobile
	Indica che le batterie sono quasi scariche ed è necessario sostituirle
	Indica un errore dello strumento