

Accès facile pour inviter vos patients à partager leurs données

Enregistrez-vous en 3 étapes simples

1. Visitez **GlucoContro.online** et cliquez sur enregistrer
2. Entrez les informations
3. Attendez l'approbation de l'administrateur de l'hôpital*

Cliquez sur "Ajouter un nouveau patient"

Créer un compte

Type de compte

 Patient

Choisissez ce type de compte si vous êtes diabétique.

 Professionnel de santé

Choisissez ce type de compte si vous êtes un professionnel de la santé.

 Soignant

Choisissez ce type de compte si vous souhaitez vous occuper d'une personne diabétique mais que vous n'êtes pas le patient.

Adresse e-mail

Entrez votre adresse e-mail

Prénom

Entrez votre prénom

Nom de famille

Entrez votre nom de famille

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR

Manuel

Code QR

Prénom

Entrez votre prénom

Nom de famille

Entrez votre nom de famille

☐ Je veux envoyer une invitation par e-mail à ce patient

Pays

Suisse

Information optionnelle

Ajouter un nouveau patient

Le  indique que votre patient a accepté l'invitation

 **Luc Bonnet** 
36 âge Type 1

Contour
Evolving with you

GlucoContro
.online

GlucoContro.online

Connectez-vous à distance aux données de vos patients*



Ascensia Diabetes Care Service
Service Clientèle
061 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

*Cela peut prendre jusqu'à 24 heures

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Contour sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées uniquement à titre informatif. Aucune relation ou approbation ne doit être déduite ou implicite.


Pour favoriser une meilleure gestion du diabète, motivez vos patients à partager leurs résultats glycémiques avec vous.

<https://glucocontro.online>

*Les patients doivent être enregistrés sur GlucoContro.online et doivent approuver le partage de leurs données avec leur professionnel de santé.

Accès facile aux informations des patients

Disponible sur un seul écran en un seul clic

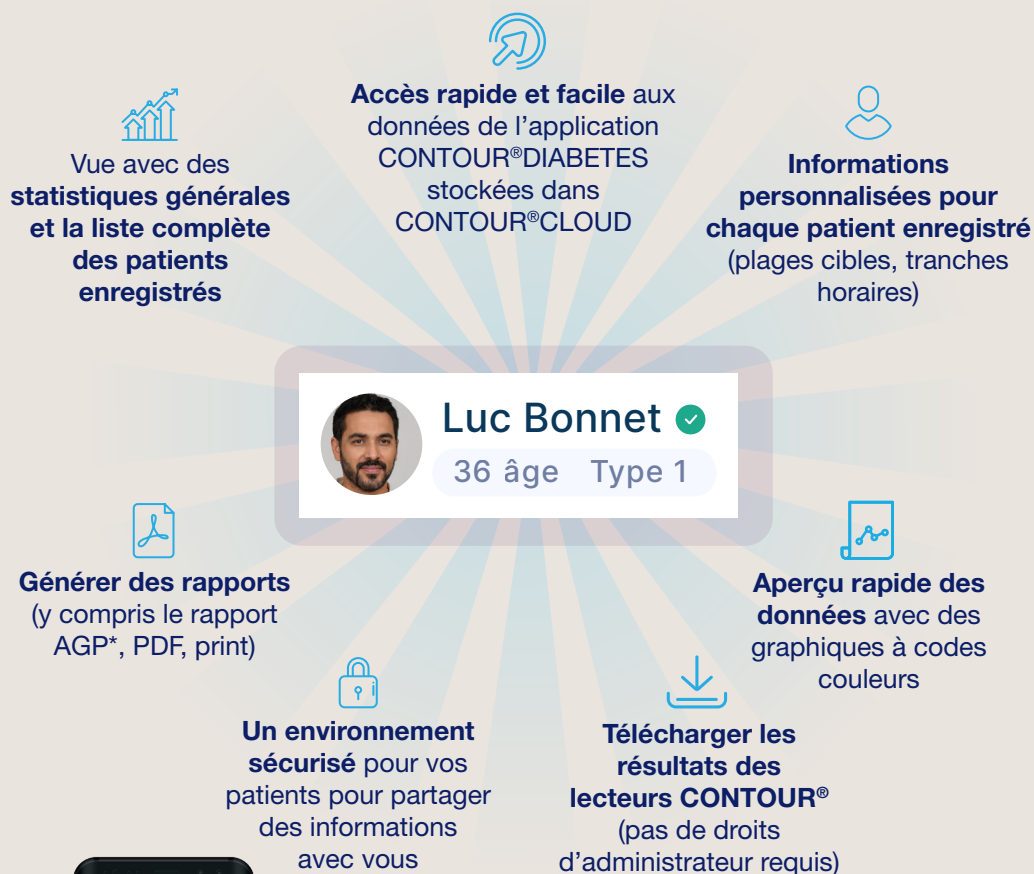

*Profil glycémique ambulatoire

Un nouveau moyen de visualiser les résultats glycémiques

Pour mieux comprendre les valeurs glycémiques

Menu accès rapide



	Total	Moyenne	Médiane	Dév. std.	Le plus haut	Le plus bas	Haute	Cible	Basse
⚙ Tout	16	9.5 mmol/L	9.9 mmol/L	4.3 mmol/L	16.8 mmol/L	2.3 mmol/L	43.75%	43.75%	12.5%
🕒 A jeun	3	3.8 mmol/L	3.7 mmol/L	1.6 mmol/L	5.4 mmol/L	2.3 mmol/L	0%	33.33%	66.67%
🕒 Avant le repas	3	8.7 mmol/L	9.8 mmol/L	2.4 mmol/L	10.3 mmol/L	5.9 mmol/L	33.33%	66.67%	0%
🕒 Après le repas	5	13.6 mmol/L	15.0 mmol/L	3.4 mmol/L	16.8 mmol/L	9.4 mmol/L	80%	20%	0%
🕒 Pas de marquage	5	9.3 mmol/L	9.9 mmol/L	2.9 mmol/L	12.7 mmol/L	4.6 mmol/L	40%	60%	0%

Résumé des résultats : pour un résumé plus détaillé de la glycémie du patient (mesures)