

Für ein einfaches Diabetesmanagement

Verwalten Sie Ihre Blutzuckermesswerte aus der CONTOUR®DIABETES App online und teilen Sie sie mit Ihrem teilnehmenden medizinischen Fachpersonal*

Laden Sie die CONTOUR®DIABETES App

1



Kostenfrei

Laden im **App Store**

JETZT BEI Google Play

Ein Konto erstellen

2



Übersicht kompatibler Betriebssysteme finden Sie unter compatibility.contourone.com

3

Koppeln Sie Ihr kompatibles CONTOUR® Blutzuckermessgerät



4

Daten online verwalten



Schneller und einfacher Zugang auf die Daten der CONTOUR®DIABETES App in der CONTOUR®CLOUD



Schnelle Datenzusammenfassung, intuitive farbige Zielbereichsanzeige



Datenfreigabe an z.B. Familienmitglieder



Mehr Informationen unter:
diabetes.ascensia.com

*Patienten müssen in GlucoContro.online registriert sein und der Weitergabe ihrer Daten an ihr medizinisches Fachpersonal zustimmen.

In nur drei einfachen Schritten mit Ihrem medizinischen Fachpersonal verbinden

Warten Sie auf die Einladung von Ihrem medizinischen Fachpersonal

Einladung per **E-Mail**

oder

Einladung über **QR-Code**

Erhalten Sie eine E-Mail-Einladung und klicken Sie auf den Link*



*Ihr medizinisches Fachpersonal sendet Ihnen eine Einladung

1

Scannen Sie den QR-Code während Ihres Arztbesuchs



2

Melden Sie sich mit der E-Mail Adresse und dem Passwort Ihrer CONTOUR®DIABETES App an

Melden Sie sich bei GlucoContro.online an

Patient **Fachpersonal**

Contour Um sich bei Ihrem Konto anzumelden, verwenden Sie die Contour Cloud-Anmeldeinformationen.

E-Mail-Adresse

E-Mail Adresse eingeben

Passwort [Passwort vergessen?](#)

Passwort eingeben

Kennwort speichern

Anmelden Sie haben kein Konto? [Registrieren](#)

3

Tragen Sie Ihre Informationen ein

[Abmelden](#)

Persönliche Daten ausfüllen

NN

Vorname Nachname

Geschlecht

Männlich Weiblich

Diabetes-Typ Therapieform



Jetzt sind Ihre Blutzuckerdaten für Ihr medizinisches Fachpersonal über GlucoContro.online zugänglich



Ascensia Diabetes Care Service
061 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch