

Condividi in modo semplice e veloce i tuoi risultati glicemici con il tuo medico.

Gestisci i tuoi valori glicemici con l'app CONTOUR®DIABETES online e condividili con il tuo medico*

Scarica l'app
CONTOUR®
DIABETES

1



Scarica gratuitamente



Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play

Per l'elenco dei sistemi operativi compatibili, visita:
compatibility.contourone.com

Crea
un account

2



3

Associa il tuo glucometro
CONTOUR® compatibile



4

Gestisci i tuoi dati
online



Accesso facile e veloce
ai dati dell'app
CONTOUR®DIABETES
nel CONTOUR®CLOUD



Veloce riepilogo dei dati,
con grafici intuitivi con codifica
colori dell'intervallo target



Condividi i tuoi dati per
esempio con membri
della tua famiglia



Per ulteriori informazioni visita:
diabetes.ascensia.com

*I pazienti devono essere registrati e devono autorizzare la condivisione dei propri dati con il professionista sanitario.

In tre semplici passaggi puoi connetterti con il tuo professionista sanitario

Attendi l'invito del tuo professionista sanitario

Invito tramite e-mail

O

Invito tramite codice QR


Quando ricevi l'invito per e-mail
clicca sul link*



*Riceverai l'invito dal tuo medico

Accedi con l'indirizzo e-mail e la password
della tua app CONTOUR®DIABETES

2

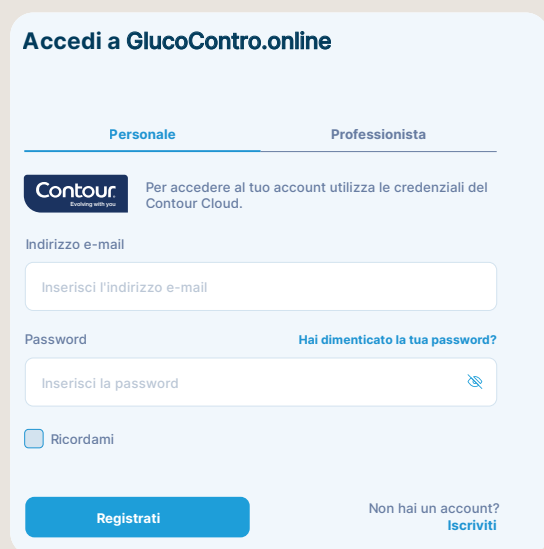

Accedi a GlucoContro.online

Personale Professionista

Contour Per accedere al tuo account utilizza le credenziali del Contour Cloud.

Indirizzo e-mail

Inserisci l'indirizzo e-mail

Password [Hai dimenticato la tua password?](#)

Inserisci la password

Ricordami

Registrati Non hai un account? [Iscriviti](#)



Ascensia Diabetes Care Service
Servizio Clienti
061 544 79 90
info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

1

Scansiona il codice QR durante
la visita medica



Aggiungi nuovo paziente

Manuale QR Code



3

Inserisci i tuoi dati



[Disconnettersi](#)

Compila i dati personali

NN

Genere

Maschio Femmina

Tipo di diabete

Tipo 2

Tipo di trattamento

Orale

peso (kg)

78

altezza (cm)

180



Il tuo professionista sanitario potrà ora
accedere ai tuoi dati della glicemia tramite
GlucoContro.online

© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Tutti i diritti riservati.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Contour, sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi. Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.

GCO_IT_PWD_11/22