

Dein Termin

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Vorbereitung auf den CGM-Termin

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung für das Eversense® System zur kontinuierlichen Glukosemessung.

Vor Deinem Insertionstermin

- Lade die Eversense CGM App aus dem Apple App Store® bzw. Google Play™ Store auf Dein kompatibles Smartphone.
- Starte die App und erstelle Dir für das optimale Nutzererlebnis ein Eversense-Konto.
 - Wähle im Begrüßungsbildschirm die Option „Ich habe keinen Smart Transmitter“.
 - Wähle die Einheit mmol/L, in der Du zukünftig mit Deinem Eversense messen wirst.
 - Notiere Deinen Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und ggf. Dein Kennwort für Dein Eversense-Konto:

Benutzername: _____


Kennwort: _____

Am Tag Deines Insertionstermins (Einsetz-Termins)

- Trage zu Deinem Termin ein lockeres, ärmelloses oder kurzärmeliges Oberteil.
- Bringe bitte Folgendes mit:
 - Dein Smartphone, voll aufgeladen und mit installierter Eversense CGM App.
 - Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort für Dein Eversense-Konto
- Um die Insertionsstelle voll ausheilen zu lassen, solltest Du es in den ersten fünf Tagen vermeiden, zu baden, zu schwimmen und anstrengende Aktivitäten zu unternehmen.
- Lies Dir vor der Anwendung des Eversense CGM Systems die Bedienungsanleitung vollständig durch und befolge unbedingt die Anweisung Deines Diabetologen.

DAS EINZIGE LANGZEIT-CGM SYSTEM MIT NUR EINEM SENSOR, DER FAST 6 MONATE HÄLT.

- Kein wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Sensorwechsel
- Kein versehentliches Verlieren des Sensors
- Keine Verschwendung von Sensoren durch abgerissene und ersetzte Transmitter
- Keine ständige Beschaffung und Mitnahme von Verbrauchsmaterialien
- Keine Pflaster, die 14 Tage halten müssen

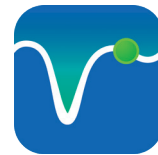

Eversense CGM App

Jetzt kostenfrei laden und auf Deinen Termin vorbereiten.



WIR SIND FÜR DICH DA.



Telefon

061 544 79 90
(Mo-Fr: 9.00-12.00 / 13.00-17.00 Uhr)



E-Mail

eversense.ch@ascensia.com

Das Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen mit Diabetes ab 18 Jahren für bis zu 180 Tage vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach wie vor hauptsächlich für die nach Tag 21 einmal täglich durchgeführte Kalibrierung, falls die Messwerte nicht den Symptomen entsprechen oder während der Einnahme von Tetracyklinen erforderlich. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen zertifizierten Arzt. Das Eversense E3 CGM System kann von einem Diabetologen verordnet werden; Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt/Diabetologen wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen findest Du unter <https://www.ascensia diabetes.com/eversense/safety-info/>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Ascensia und das „Ascensia Diabetes Care“-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.



Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel
www.ascensia-diabetes.ch

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway · Germantown, MD 20876-7005 USA

ENDLICH FREI MIT DEM EINZIGEN LANGZEITSENSOR FÜR BIS ZU 6 MONATE

Schritt für Schritt



Einfacher starten:
Eversense Team anrufen
und wir machen den Rest: 061 544 79 90

1. Ärztliche Verordnung und Antrag an die Krankenkasse

Dein Diabetologe stellt Dir ein Rezept für das Eversense CGM System aus.

Dazu kann das Formular „Antrag an die Krankenkasse für die Kostenübernahme“ verwendet werden.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktiere Deinen Diabetologen.

2. Bestätigung der Krankenkasse abwarten

Der Diabetologe übernimmt die initiale Koordination der Abläufe mit Deiner Krankenkasse. Deine Krankenkasse sendet Dir oder Deinem Diabetologen die Kostenübernahmebestätigung zu.

Was tun, wenn die Krankenkasse ablehnt?

Wir sind kontinuierlich in Gesprächen mit den Krankenkassen, um die Situation für Dich zu optimieren. Sollte es dennoch einmal nicht klappen, hilft Dir auch hier gerne unser **Eversense Team im Ascensia Diabetes Care Service** weiter.

3. Termin im Eversense-Zentrum vereinbaren

Vereinbare nun Deinen Einsetz-Termin (Insertionstermin) in einem Eversense-Zentrum. Das Zentrum in Deiner Nähe findest Du unter:

www.ascensia-diabetes.ch/eversense-clinics (oder scanne untenstehenden QR-Code)



Mein Eversense-Zentrum:

4. Du erhältst Deinen Transmitter

Wenn Du den Einsetz-Termin mit Deinem Eversense-Zentrum vereinbart hast, wird das Zentrum rechtzeitig für diesen Termin das Eversense CGM System bestellen.

Daraufhin schickt Ascensia Diabetes Care Dir den Eversense Transmitter nach Hause. Bitte bringe diesen zu Deinem Einsetz-Termin mit und stelle sicher, dass der Transmitter vollständig aufgeladen ist.

Lade ausserdem die Eversense CGM App (aus dem App Store® bzw. Google Play™ Store) herunter.

Informationen zur Kompatibilität findest Du unter: www.global.eversenseddiabetes.com/compatibility

5. Technische Einweisung und Einsetzen des Sensors


Du erhältst in Deinem Eversense-Zentrum eine technische Einweisung in Dein Eversense CGM System. Danach bekommst Du Deinen ersten Sensor eingesetzt!

Eine Checkliste für den Einsetz-Tag findest Du auf der Rückseite dieses Flyers.

6. Die neu gewonnene Freiheit geniessen!

Solltest Du einmal Unterstützung mit Deinem neuen Eversense benötigen, kontaktiere einfach das **Eversense Team im Ascensia Diabetes Care Service** und wir unterstützen Dich gerne!

Ascensia Diabetes Care Service
Telefon: 061 544 79 90
(Mo-Fr: 9.00 - 12.00 Uhr / 13.00 -17.00 Uhr)
E-Mail: eversense.ch@ascensia.com

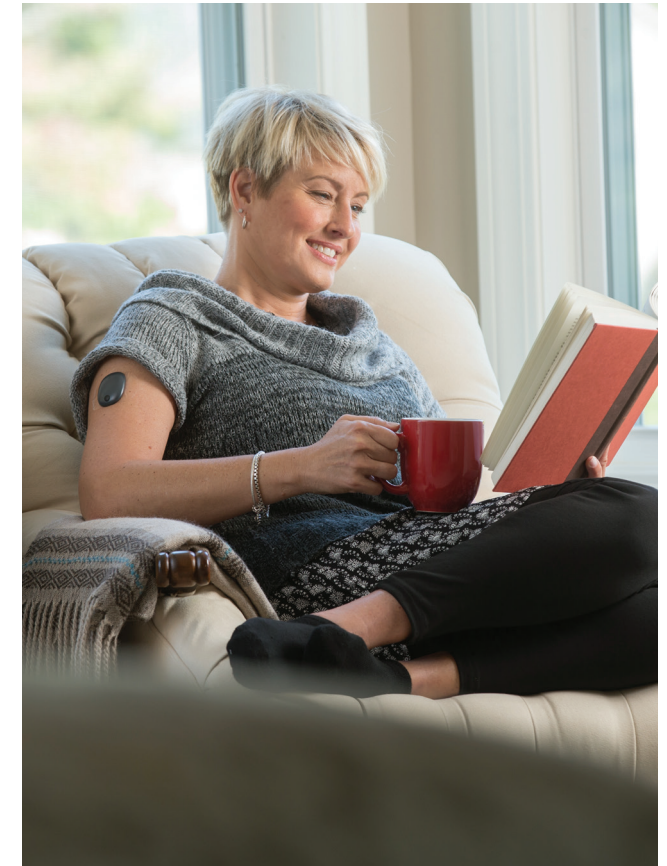

7. Rechnungsstellung und Rückvergütung

Das Eversense Zentrum wird die Kosten für den Sensor und die Insertion direkt Deiner Krankenkasse in Rechnung stellen.

Transmitter/Pflaster: Der Eversense Transmitter wird Dir direkt in Rechnung gestellt (E-Shop Bestellung).

Wir bitten Dich, diese Rechnung direkt zu begleichen und sie gleichzeitig an deine Krankenkasse, für die Rückvergütung, zuzustellen.

Einfacher starten:

Eversense Team anrufen

und wir machen den Rest: 061 544 79 90