

## Il tuo appuntamento

Data: \_\_\_\_\_

Orario: \_\_\_\_\_

## Prepararsi all'appuntamento per il CGM

Congratulazioni per aver scelto il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Eversense® E3.

## Prima dell'appuntamento

- Scarica l'App Eversense CGM sul tuo dispositivo mobile compatibile dall'App Store di Apple® o dal Google Play™ Store.
- Avvia l'applicazione e segui le istruzioni per creare un account per il sistema CGM Eversense.
  - Nella schermata di benvenuto, seleziona "Non ho uno Smart Transmitter".
  - Seleziona l'unità di misura mmol/L con cui misurerà il tuo Eversense.
  - Prendi nota del tuo nome utente (indirizzo e-mail) ed eventualmente della tua password per l'account Eversense:

Nome utente: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_

## Il giorno dell'appuntamento (Inserzione)

- Indossa una maglietta non attillata, senza maniche o a maniche corte.
- Ti preghiamo di portare con te:
  - il tuo dispositivo mobile, completamente carico e con l'app Eversense CGM installata.
  - nome utente (indirizzo e-mail) e password del tuo account Eversense
- Per consentire la completa guarigione del sito di inserimento, evitare di fare il bagno, nuotare e svolgere attività faticose per i primi cinque giorni.
- Prima di utilizzare il sistema CGM Eversense, leggere l'intero manuale d'uso e seguire le istruzioni del proprio diabetologo.

## L'UNICO CGM A LUNGO TERMINE CON UN UNICO SENSORE CHE DURA FINO A 6 MESI.

- Nessuna sostituzione settimanale o bisettimanale del sensore
- Nessuna perdita accidentale del sensore
- Nessun spreco di sensori quando il trasmettitore viene rimosso o sostituito
- Nessun frequente acquisto e trasporto di materiali di consumo
- Nessun adesivo che deve durare fino a 14 giorni



### App Eversense CGM

Scaricala ora gratuitamente e preparati all'appuntamento.



## SIAMO A TUA DISPOSIZIONE

**Telefono**  
061 544 79 90  
(Lu-Ve, ore 9.00-12.00 / 13.00-17.00)

**E-mail**  
eversense.ch@ascensia.com

Il sistema di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) Eversense® E3 è indicato per la misurazione continua dei livelli di glucosio per un massimo di 180 giorni in persone con diabete di età pari o superiore a 18 anni. Il sistema sostituisce le misurazioni della glicemia mediante prelievo da polpastrello, necessarie per prendere decisioni sul trattamento per il diabete. La misurazione della glicemia con prelievo da polpastrello è ancora necessaria per la calibrazione, principalmente una volta al giorno dopo il 21° giorno e quando i sintomi non corrispondono alle informazioni fornite dal CGM, oppure quando si assumono farmaci della classe delle tetracicline. Le procedure di inserimento e rimozione del sensore vengono eseguite da un medico certificato. Il sistema CGM Eversense E3 può essere prescritto da un diabetologo; i pazienti devono rivolgersi al proprio medico/diabetologo per ricevere ulteriori informazioni.

**Per informazioni importanti relative alla sicurezza, vedere**  
<https://www.ascensiadibetes.com/eversense/safety-info/>

Eversense, il monitoraggio continuo del glucosio Eversense E3 e il logo Eversense sono marchi di fabbrica di Senseonics, Incorporated. Ascensia e il logo Ascensia Diabetes Care sono marchi e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi. Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.



Distribuito da:  
Ascensia Diabetes Care Switzerland AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel  
[www.ascensia-diabetes.ch](http://www.ascensia-diabetes.ch)

Prodotto da: Senseonics, Inc.  
20451 Seneca Meadows Parkway · Germantown, MD 20876-7005 USA

# MASSIMA LIBERTÀ CON L'UNICO SENSORE CGM A LUNGO TERMINE CHE DURA FINO A 6 MESI

## Passo per passo



## 1. Prescrizione medica e domanda alla cassa malati

Il tuo o diabetologo compilerà una prescrizione medica per il sistema CGM Eversense.

A questo scopo è possibile utilizzare il modulo “Richiesta per l’assunzione dei costi da parte della cassa malati”. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo diabetologo.

## 2. Attendere la conferma della cassa malati

Il diabetologo si occuperà della comunicazione iniziale con la tua cassa malati. La tua cassa malati invierà a te o al tuo diabetologo la conferma della copertura delle spese.

### Cosa fare in caso di rifiuto da parte della cassa malati?

Siamo continuamente in trattative con le casse malati per ottimizzare la situazione per te. Tuttavia, se ancora non dovesse funzionare, il nostro **Team del Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care** sarà lieto di aiutarti.

## 3. Fissare un appuntamento presso il centro Eversense

Fissa ora l’appuntamento per l’inserimento del sensore presso un centro Eversense. Puoi trovare il centro più vicino a te su: <https://www.ascensia-diabetes.ch/it-CH/eversense-e3/coverage/find-a-provider/>  
Oppure scansiona il QR-Code qui sotto



Il mio centro Eversense

## 4. Ricevere il trasmettitore

Una volta fissato l’appuntamento per l’inserimento del sensore, il centro Eversense ordinerà il sistema CGM Eversense in tempo utile per quella data.

Ascensia Diabetes Care invierà quindi a casa tua lo Smart Transmitter Eversense che ti preghiamo di portare con te, completamente carico, all’appuntamento per l’inserimento del sensore.

Scarica l’app Eversense CGM sul tuo dispositivo dall’App Store di Apple® o dal Google Play™ Store.

Per informazioni sulla compatibilità, consulta: [www.global.eversenseddiabetes.com/compatibility](http://www.global.eversenseddiabetes.com/compatibility)

## 5. Briefing tecnico e inserimento del sensore

Presso il centro Eversense riceverai un briefing tecnico sul tuo sistema CGM Eversense. Successivamente si procederà con l’inserimento del tuo primo sensore!

Sul retro di questo opuscolo troverai una check-list per il giorno dell’inserimento del sensore.

## 6. Goditi la ritrovata libertà!

Se hai bisogno di aiuto per il tuo nuovo sistema CGM Eversense, contatta semplicemente il **Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care**. Siamo a tua disposizione!

Telefono: 061 544 79 90  
(Lu-Ve, ore 9.00-12.00 / 13.00-17.00)  
E-mail: [eversense.ch@ascensia.com](mailto:eversense.ch@ascensia.com)



## 7. Fatturazione e rimborso

Il centro Eversense fatturerà i costi per il sensore e l’inserzione direttamente alla cassa malati.

**Trasmettitore/Cerotti:** Il trasmettitore verrà fatturato direttamente a te (Ordine via E-shop).

Ti preghiamo di pagare questa fattura e di inviarla allo stesso tempo alla tua cassa malati per il rimborso.